

แนวทางการทำความสะอาดแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)

แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) ที่บุคคลทั่วไปใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อเสริมการป้องกันการได้รับเชื้อโควิด-19 โดยใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะกลุ่มบุคคล/อาชีพที่มีกิจกรรมที่ต้องพูดคุยหรือใกล้ชิดกันเป็นเวลาดำเนินช้านาน เช่น ช่างตัดผม นักเรียน ครู จึงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาทำความสะอาดแผ่นใสครอบหน้า เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก ดังนี้

- ไม่ควรใช้แผ่นใสครอบหน้าร่วมกับผู้อื่น และไม่นำมาใช้ซ้ำในกรณีที่มีบุคคลไอ จาม ใส่แผ่นใสครอบหน้า หรือพบว่าสกปรกมากหรือมีรอยขีดข่วนจนทำให้มองเห็นไม่ชัด โดยทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด
- ทำความสะอาดโดยนำผ้าสะอาดชุบน้ำยาทำความสะอาด หรือแผ่นเช็ดทำความสะอาด ค่อยๆ เช็ดเริ่มจากด้านในของแผ่นใสครอบหน้า แล้วเช็ดด้านนอกแผ่นใส
- ฆ่าเชื้อโดยแนะนำให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือสารที่มีส่วนประกอบคลอรีน ๐.๑% (ดีกว่าการใช้แอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์จะทำให้พลาสติกเปลี่ยนสี กาวหลุดลอกง่าย และทำลายการป้องกันการเกิดฝ้าบนแผ่นพลาสติกได้) อาจทำซ้ำ ๒ รอบ โดยเน้นบริเวณด้านนอกแผ่นใส แล้วทิ้งระยะเวลาให้เกิดการฆ่าเชื้อ ระวังบริเวณโคมกันกระแทกชำรุด
- เช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด
- ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งสนิทหรือเป่าลมร้อนให้แห้ง

อ้างอิง:

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-us-settings/emergency-considerations-ppe.html>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html>

https://help.prusa3d.com/en/article/prusa-face-shield-disinfection_125457#_ga=2.154004088.1564946874.1586296835-340851562.1586296835